



FFP2


Atenschutzmaske Transparent
Masque de protection respiratoire transparent
Mascherina respiratoria trasparente
Transparent respiratory protection mask
Mascarilla de protección transparente
MaXsmile Pro 105109



 Swiss Made

Questa mascherina, MaXsmile Pro 105109, offre un'efficace **protezione delle vie aeree da aerosol solidi e liquidi** secondo la EN 149:2001+A1:2009.

Scheda tecnica

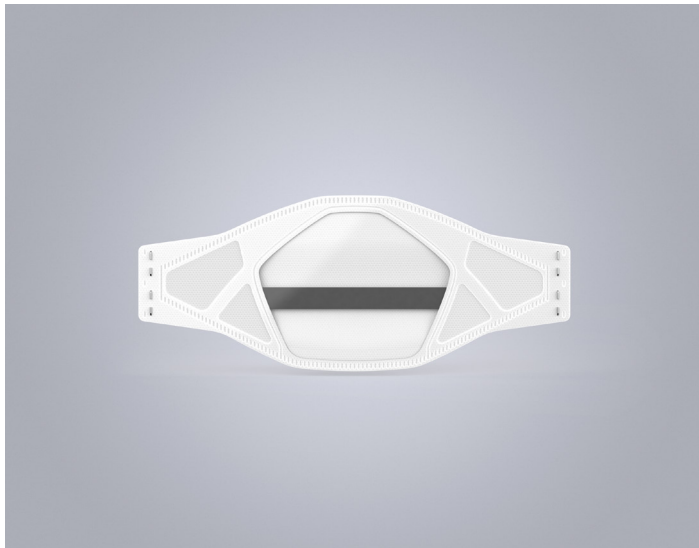

Caratteristiche principali

- Semimaschera filtrante antipolvere della classe di apparecchi FFP2
- Penetrazione del mezzo filtrante: max. 6%
- Perdita di tenuta verso l'interno testata
- La mascherina è concepita per essere utilizzata durante un singolo turno di lavoro («NR»)
- Bande elastiche per la testa
- Clip per il naso imbottita in espanso, per un'ottima aderenza
- Il design piatto permette di risparmiare spazio
- Senza lattice, ipoallergenica
- La finestra trasparente nell'area della bocca consente la lettura labiale

Prove e conformità

La semimaschera filtrante antipolvere soddisfa i requisiti della EN 149:2001+A1:2009 e della Direttiva europea (EU) 2016/425. La certificazione e la procedura di valutazione della conformità sono state condotte in collaborazione con l'organismo di controllo e certificazione accreditato indicato di seguito: CCQS Certification Services Ltd., Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 FWP6.

 2834

Materiali

Per la produzione di questa mascherina sono stati utilizzati i seguenti materiali:

- Filtro – polipropilene
- Elastico – senza lattice
- Clip per il naso – metallo/polipropilene
- Espanso naso – espanso di PU (espanso di poliuretano)
- Finestra trasparente – film coestruso in polipropilene (CPP)

Utilizzo


La scelta del dispositivo di protezione individuale più adatto (DPI) dipende dalla singola situazione e deve essere fatta solo da persone qualificate.

Istruzioni per l'uso

- La mascherina è destinata all'utilizzo durante un turno di lavoro e non deve essere riutilizzata.
- La mascherina non deve più essere utilizzata:
 - se è inumidita dall'aria respirata
 - se è danneggiata/molto sporca o se non chiude più ermeticamente

MaXsmile Pro


Lavare e disinfettare le mani prima di indossare la mascherina.

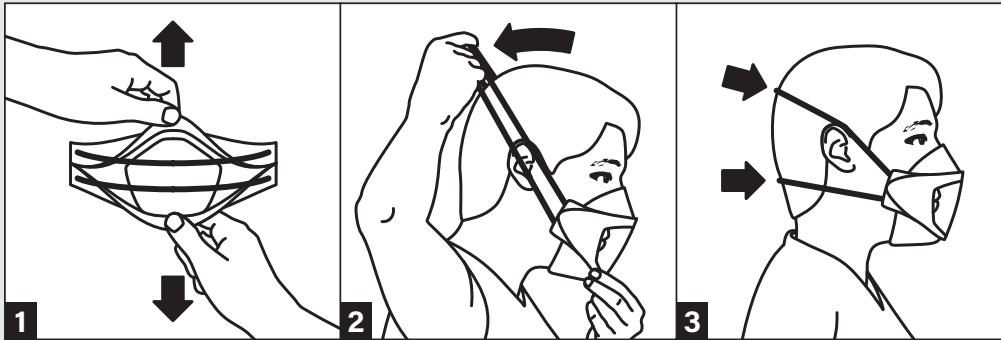

1 Aprire la mascherina e afferrare le bande elastiche per la testa

2 Tenere la mascherina su naso, bocca e mento, con una mano sul lato esterno fissare delicatamente la mascherina sul viso e con la mano libera tirare le due bande elastiche sopra la testa

3 Posizionare la banda elastica inferiore sotto le orecchie e tirare quella superiore sulla nuca

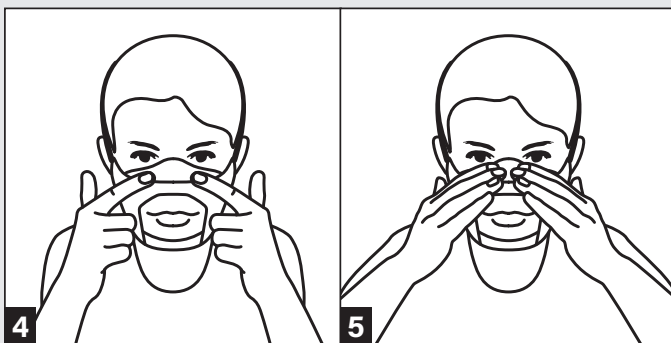

4 Con i due indici modellare la clip per il naso sulla forma del viso. Portatori di occhiali: rimettere gli occhiali.

5 Controllare che la mascherina aderisca correttamente. Inspirare profondamente; se non aderisce perfettamente, riposizionarla.

⚠ Avvertenze

- La mascherina deve aderire bene e coprire completamente bocca e naso.
- Se sul volto sotto la linea di aderenza sono presenti peli e/o barba, l'efficacia della mascherina non può essere garantita.

Rimozione e smaltimento della mascherina

1. Portatori di occhiali: togliere gli occhiali
2. Afferrare le bande elastiche con le due mani, farle scivolare oltre la testa e allontanarle dal viso insieme con la mascherina
3. Riporre la mascherina senza toccare il tessuto e smaltirla al più tardi dopo la fine del turno di lavoro in un contenitore per rifiuti chiuso
4. Lavarsi le mani
5. Portatori di occhiali: rimettere gli occhiali

Unità di prodotto

- Imballaggio primario: busta non stampata da 5 mascherine
- Imballaggio secondario: scatola pieghevole da 20 mascherine
- Imballaggio terziario: cartone da 9 SP = cartone da 180 mascherine per cartone (dim. int.: 365 x 243 x 218 mm, dimensioni esterne: 371 x 249 x 330 mm)
- Unità di trasporto: 45 cartoni per pallet = 8'100 mascherine (9 cartoni per strato, 5 strati per pallet, altezza totale del pallet 1,795 m)

Conservazione e trasporto

Il prodotto deve essere conservato e trasportato nell'imballaggio originale. Per ulteriori condizioni riguardanti la conservazione e la durata consultare la brochure informativa del produttore.